

# Des solutions de finitions exceptionnelles

de TP Orthodontics

## Réalisez une finition parfaite pour chaque patient.

Le fondateur de TPO, le Dr H. D. Kesling, a inventé le Tooth Positioner (positionneur de dents) dans le seul but de parvenir à « un positionnement et une rétention finals artistiques ». À présent, plus de 70 ans plus tard, la conception de base de cet appareil remarquable aide encore les orthodontistes à réaliser une finition de qualité ABO pour chaque patient. C'est juste une des raisons pour lesquelles TPO® est mondialement reconnu comme le leader des appareils de finition sur mesure.

Que vous commenciez par un traitement orthodontique fixe ou avec l'un des nombreux systèmes d'aligneurs disponibles sur le marché, vous obtiendrez des résultats spectaculaires. Plus vite que vous auriez pensé possible en prescrivant un appareil de finition de TPO. Avec nos **Tooth Positioners** sur mesure, nos appareils préformés **Pre-Finisher®** et l'appareil de finition orthodontique **Refine®**, vous pouvez ravir vos patients avec un retrait précoce de leurs brackets, obtenir une meilleure observance de leur part et réaliser une finition toujours parfaite!

*Les orthodontistes  
qui désirent terminer  
le traitement de leurs  
patients avec une  
finition de qualité  
supérieure, devraient  
envisager d'inclure  
un positionneur de  
dents dans la phase  
de finition.*

Gregory J. Stock, James A. McNamara, Jr, and Tiziano Baccetti, "Efficacy of 2 finishing protocols in the quality of orthodontic treatment outcome" (L'efficacité de 2 protocoles de finition pour un traitement orthodontique de qualité), AJO-DO, vol. 140, issue 5, pp. 688-695, Nov. 2011.

Pour plus d'informations, visitez  
**tportho.com** ou appelez  
**+33 2 59 60 30 53**



TP Orthodontics Europe  
tportho.com

TP Orthodontics offre la gamme d'appareils de finition la plus complète sur le marché. Utilisez les informations suivantes pour choisir l'appareil qui convient le mieux à votre pratique, votre cabinet et votre patient. Chacun de nos appareils diffère par la taille et la forme. Ils sont tous conçus pour obtenir une finition optimale avec les traitements par appareils fixes comme avec les traitements par aligneurs.

Consultez notre catalogue du service laboratoire sur [tportho.com/custom](http://tportho.com/custom)

## Original Tooth Positioner et Mini-Positioner



Le Tooth Positioner est un appareil souple sur mesure moulé une maquette (setup) constituée des deux arcades positionnées selon l'axe charnière normal. Le format plus large que la dentition du Tooth Positioner original favorise le massage des gencives qui peuvent être enflammées après le traitement orthodontique. Des crochets de placement de précision peuvent être ajoutés pour l'aide au placement et si une rétention supplémentaire est souhaitée. L'appareil est muni de suffisamment d'orifices pour respirer confortablement et renforcer l'acceptation. Le Mini-positionneur est 50% moins volumineux et s'adapte à des écarts plus importants grâce à une flexibilité accrue.

- Il permet de retirer les appareils fixes trois à six mois plus tôt
- Il permet de fermer les petits espaces et de corriger les rotations et les écarts buccolinguaux mineurs
- Il permet de corriger et d'apparier les dents simultanément sur les deux arcades
- Il permet de réaliser des traitements d'alignement en favorisant une occlusion idéale sans avoir à recourir à des appareils d'alignement supplémentaires

**Utiliser Original Tooth Positioner quand :** en cas de besoin d'une stimulation maximale des gencives ou d'un protège-dents.

**Utiliser Mini-Positioner quand :** lorsque l'espace à fermer est supérieur à 2 mm ou quand le Tooth Positioner n'est pas nécessaire pour la stimulation des gencives ou pour servir de protège-dents.

## Pre-Finisher® Appliance



Le Pre-Finisher est un appareil de finition préformé portable directement sans avoir à prendre des empreintes. Une mesure rapide de la distance intercanine permet de sélectionner la taille appropriée ; un choix économique lorsqu'un appareil sur mesure n'est pas nécessaire. L'appareil est disponible en tailles différant d'incrément de 1 millimètre pour un ajustement précis et en versions extraction et non extraction.

- Il permet de retirer les appareils fixes plus tôt et peut être utilisé comme appareil de rétention
- Il permet de fermer les petits espaces et de corriger les rotations mineures
- Il permet de corriger et d'apparier les dents simultanément sur les deux arcades
- Il permet de réaliser des traitements d'alignement en favorisant une occlusion idéale sans avoir à recourir à des appareils d'alignement supplémentaires

**Utiliser le Pre-Finisher quand :** commencer la finition lorsque les dents sont prêtes pour le déplacement, juste après le retrait des brackets. À utiliser le temps que l'appareil sur mesure soit fabriqué.

## Refine® Orthodontic Finishing Appliance



Le plus petit des appareils de finition, le nouveau appareil Refine permet de réaliser le même degré de finition que le Tooth Positioner et le Mini-Positioner. Facilement commandable en ligne, il est disponible dans un grand choix de couleurs pour encourager les patients à le porter.

- Il permet de retirer les appareils fixes plus tôt
- Il permet de fermer les petits espaces et de corriger les rotations et les écarts buccolinguaux mineurs
- Il permet de corriger et d'apparier les dents simultanément sur les deux arcades pour obtenir une occlusion idéale
- Parfaitement adapté pour le traitement par aligners, l'appareil Refine peut être utilisé pour remplacer plusieurs aligners lorsqu'un affinement de l'alignement est nécessaire

**Utiliser l'appareil Refine quand :** lorsque le patient en est au stade de l'affinage du traitement par aligners et ne souhaite plus porter d'autres aligners. L'appareil Refine permet de passer du port d'un appareil à temps plein à un port à temps partiel.

**TPRX™** Management digital  
des appareils custom  
[tportho.com/custom](http://tportho.com/custom)

Maintenant, une gestion de prescription numérique avec TPRX™.

**Soumettre – Gérer – Archiver** toutes vos ordonnances aujourd'hui ! Pour plus d'informations sur TPRX, appelez **+33 2 59 60 30 53** ou visitez-nous en ligne.