

Außergewöhnliches Finishing

von TP Orthodontics

Erzielen Sie jedes Mal ein perfektes Finishing.

Der Gründer von TPO, Dr. H. D. Kesling erfand den Positioner eigens, um eine "endgültige ästhetische Positionierung und Haftfestigkeit" zu realisieren. Heute nach über 70 Jahren hilft das Grunddesign dieser bemerkenswerten Apparatur den Kieferorthopäden routinemäßig ein Finish von ABO-Qualität zu erreichen. Dies ist nur ein Grund, warum TPO® weltweit als der Marktführer für kundenspezifische Apparaturen für das Finishing bekannt ist.

Ob Sie die Behandlung mit einer KFO-Apparatur oder einem der vielen Alignersystem auf dem Markt beginnen, Sie werden - schneller als erwartet - beeindruckende Ergebnisse sehen, wenn eine TPO-Apparatur zum Finishing eingesetzt wird. Mit unseren kundenspezifischen **Tooth Positioners, Pre-Finisher®** vorgeformten Apparaturen und der neuen **Refine®** Apparatur können Sie Ihre Patienten aufgrund des frühen Entfernens des Brackets begeistern, deren Compliance verbessern und jedes Mal die Behandlung einwandfrei vollenden.

*Kieferorthopäden,
die ihre Patienten
routinemäßig
nach umfassenden
Qualitätsstandards
bis zum Finish
behandeln
wollen, möchten
möglicherweise
einen Positioner
als Bestandteil
ihres typischen
Finishing-Protokolls
verwenden.*

Gregory J. Stock, James A. McNamara, Jr, und Tiziano Baccetti, "Efficacy of 2 finishing protocols in the quality of orthodontic treatment outcome," AJODO, Bd. 140, Ausgabe 5, S. 688-695 ff., Nov. 2011.

Erfahren Sie mehr unter tportho.com

Deutschland **+44 113 220 3235**

Österreich **+44 113 220 3235**



TP Orthodontics Europe
tportho.com

TP Orthodontics hat das umfangreichste Angebot an Finishing-Apparaturen. Nutzen Sie diese Informationen, um die richtige für sich, Ihre Praxis und Ihren Patienten auszuwählen. Jede ist einmalig in Größe und Passform. Alle sind so konzipiert, dass sie das bestmögliche Finish bei der Behandlung mit einem Aligner oder mit einer festsitzenden Apparatur erzielen.

Schauen Sie sich den ganzen Katalog zu kundenspezifischen Labordienstleistungen unter tportho.com/custom an

Original Tooth Positioner und Mini-Positioner



Der Positioner ist ein kundenspezifisches, elastisches Mundstück, das über einem Aufbau errichtet ist und im normalen Scharnierachsenverhältnis hergestellt wird. Die Übergröße des Original-Positioners begünstigt die Massage des Zahnfleisches, das nach der kieferorthopädischen Behandlung entzündet sein kann. Präzisionsfedern können wahlweise als Platzierungshilfe verwendet werden, und falls zusätzliche Haftfestigkeit gewünscht ist. Ausreichend Platz für Atemkomfort und eine erhöhte Akzeptanz. Der Mini-Positioner ist um 50% kleiner und passt sich aufgrund seiner Flexibilität größeren Abweichungen an.

- Die festen Apparaturen können drei bis sechs Monate früher entfernt werden
- Schließt kleine Zwischenräume und korrigiert geringe Rotationen und bukkolinguale Abweichungen
- Korrigiert und ordnet die Zähne gleichzeitig in beiden Kiefern
- Für die Behandlung mit Aligner geeignet, da die ideale Okklusion ohne weitere Alignerschienen unterstützt wird

Verwenden Sie den Original Tooth Positioner für: maximale Zahnfleischstimulation oder wenn eine Zahnschutzapparatur erforderlich ist

Verwenden Sie den Mini-Tooth Positioner wenn: Abstände von mehr als 2 mm in einem Kieferbogen geschlossen werden sollen oder ggf. in Fällen, wo kein Original-Positioner für die Zahnfleischstimulation oder der Einsatz von Zahnschutz notwendig ist.

Pre-Finisher® Apparatur



Eine vorgeformte Finishing-Apparatur, die sofort eingepasst werden kann, ohne dass Abdrücke genommen werden müssen. Eine schnelle Vermessung von Eckzahn zu Eckzahn garantiert die Auswahl der richtigen Größe - und ist eine kostensparende Möglichkeit, wenn eine kundenspezifische Apparatur nicht erforderlich ist. In Schrittgrößen von 1 mm zur genauen Einpassung und verfügbar in Versionen bei Behandlung mit oder ohne Extraktion.

- Die festen Apparaturen können früh entfernt werden und können als Retainer verwendet werden
- Schließt geringe Zwischenräume und korrigiert geringfügige Rotationen
- Korrigiert und ordnet die Zähne gleichzeitig in beiden Kiefern
- Für die Behandlung mit Aligner geeignet, da die ideale Okklusion ohne weitere Alignerschienen unterstützt wird

Verwenden Sie den Pre-Finisher wenn: direkt nach der Bracket-Entfernung mit dem Finishing begonnen werden soll, sobald die Zähne für die Bewegung vorbereitet sind. Als Zwischenlösung, wenn der kundenspezifische Retainer noch nicht hergestellt ist.

Refine® Apparatur



Die kleinsten Finishing-Apparaturen liefern das gleiche Finishing wie der Positioner und Mini-Positioner. Einfach online zu bestellen; verschiedene Farben können dem Patienten angeboten werden.

- Bietet die Möglichkeit, die festen Apparaturen früher zu entfernen
- Schließt kleine Zwischenräume und korrigiert geringe Rotationen und bukkolinguale Abweichungen
- Korrigiert und ordnet die Zähne gleichzeitig in beiden Kiefern und fördert damit die Okklusion
- Ideal für die Behandlung mit Alignersystem geeignet, kann der Refine verschiedene Alignerschienen ersetzen, wenn ein Refinement notwendig ist

Verwenden Sie den Refine wenn: der Patient sich im Stadium des Refinement der Aligner-Behandlung befindet und keine weiteren Aligner wünscht. Ermöglicht Ihnen, das Tragen der Apparatur von Vollzeit auf Teilzeit beim Patienten umzustellen. Schicken Sie Abdrücke ein oder reichen Sie STL-Dateien online ein.

TPRX™ Digitalmanagement von maßgefertigten Apparaturen
tportho.com/custom

Digitales Management mit TPRX™.

Einreichen – Verwalten – Archivieren in einem Schritt.

Mehr Infos über TPRX unter **+44 113 220 3235** oder besuchen Sie uns online.